

ZMIANA INTERWAŁU

Zalecenie dotyczące zmiany UROMED worków na mocz

Worek na mocz **bez komory kroplowej**

Torba na nogę


Na przykład UROMED CYSTOBAG MINI 750 S
worek na mocz na nogę (REF 4893)

Zmień wszystkich:

Poniedziałek

Środa

Piątek

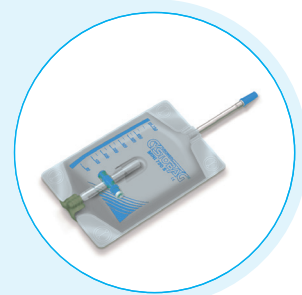

Torba na łóżko

Na przykład UROMED CYSTOBAG LS 2000
system odprowadzania moczu (REF 4801)

Zmień wszystkich:

Poniedziałek

Środa

Piątek



Worek na mocz **z komorą kroplową**

Torba na łóżko

Na przykład UROMED CYSTOBAG TK 2000 »comfort«
zamknięty system odprowadzania moczu (REF 4802)

Zmień wszystkich:

10.

20.

30.

danego miesiąca



**W razie jakichkolwiek
pytań prosimy o kontakt.**

UROMED Kurt Drews KG

Meessen 7/11
22113 Oststeinbek
GERMANY

Phone +49 (0) 40 71 30 07-33

Fax +49 (0) 40 71 30 07-99

E-mail homecare@uromed.de

www.uromed.eu



Więcej języków można znaleźć na naszej stronie
internetowej www.uromed.eu pod nagłówkiem "Service".